



Obecně se předpokládá, že mikroorganismy osídlují různé typy ran. Jejich dekontaminace, důkladné vyčištění rány a ošetření životaschopné tkáně je důležité, aby se zabránilo infekci a byla zajištěna optimální podpora procesu hojení.

ActiMaris® Forte – roztok na čištění a hojení ran (300 ml)

Obecné informace: k čištění, desinfekci a urychlení hojení akutních, chronických a zánětlivých ran na kůži a sliznici. Výrazně snižuje zánět, otok a případný zápach rány. Obzvláště vhodný na špatně se hojící nebo infekční rány. Vhodný také k hojení afekcí dutiny ústní, nosní nebo genitálií.

1. Profil přípravku:

ActiMaris® Forte roztok obsahuje aktivní singletový kyslík (1O_2), mořskou sůl a ionizovanou zásaditou vodu (pH až 9,8).

Aktivní kyslík účinně a bez poškození tkáně eliminuje patogenní mikroorganismy (bakterie, viry, plísňe). Oxidační efekt singletového kyslíku (1O_2) výrazně neutralizuje zápach ran.

Alkalické pH podporuje kontrolované postupné uvolňování aktivního kyslíku pomocí hydroxylových (OH) skupin - jako součást přirozeně vyváženého oxidačně-redukčního systému.

Mořská sůl obsahuje chlorid sodný jako hlavní složku a více než 80 dalších prvků (hořčík, draslík, vápník, síru, železo a nezbytné stopové množství jódu, zinku, manganu a selenu). Stejně jako v mořské vodě, i v ActiMaris® forte roztoku jsou tyto prvky přítomny v přírodní komplexní sloučenině a ve fyziologicky správných koncentracích, takže příznivě ovlivňují děje na buněčné úrovni a metabolismus rány.

Zvýšená slanost ActiMaris® Forte roztoku způsobuje optimální hyper-osmotický efekt, který podporuje rychlé snížení otoku.

2. Oblasti použití:

ActiMaris® Forte roztok je vhodný:

K intenzivnímu čištění, desinfekci, snížení zánětu a urychlení hojení

- akutních mechanických ran (odřeniny, řezné, tržné rány, puchýře, otoky, opruzeniny, bodnutí hmyzem)
- zánětlivých procesů na kůži a sliznici (afty, akné, opary, plísňové infekce, záněty dutiny ústní, dásní, zvukovodu)
- čerstvých pooperačních ran a jizev
- chronických ran (běrcové, diabetické vředy, infekční rány, píštěle, dekubity)
- termických a chemických ran (popáleniny 1. a 2. stupně)
- vstupních míst katetrů, PEG trubic a drénů

K peroperačnímu čištění a oplachování ran.

Ke zvlhčení a změkčení obvazového materiálu a krytí ran při jeho výměně nebo pokud je přilepeno k ráně.

K dekontaminaci těla při pozitivním nálezu MRSA, VRE.

ActiMaris® Forte roztok je obzvláště vhodný k čištění a urychlení hojení závažných, špatně se hojících, silně infekčních nebo zapáchajících ran.

3. Instrukce k použití

ActiMaris® Forte roztok se uchovává při pokojové teplotě. Při čištění velmi bolestivých ran jej lze zahřát na tělesnou teplotu (37° C). Před použitím ActiMaris® Forte - roztoku by se rány měly nejdříve vypláchnout a vyčistit přípravkem ActiMaris® Sensitiv – roztok na výplach ran, aby se odstranily případné nečistoty či zbytky povlaků a oděvů.

Pro následné hloubkové čištění, nastartování procesu hojení a odstranění pachů rány se používá ActiMaris® Forte roztok spolu s vlhčenými sterilními obvazovými materiály. Aplikace by se měla primárně provádět jako klasická mokrá/suchá fáze.

Doporučená doba aplikace mokré fáze v případě závažné, silně infekční nebo zapáchající rány je 5 - 10 minut.

Doporučená doba aplikace při výplachu dutiny ústní je alespoň 30 sekund.

Doba trvání a četnost aplikace by měly být přizpůsobeny stavu rány. Doba trvání a frekvence aplikace není nijak omezena.

V aplikaci je třeba pokračovat, dokud všechny povlaky a nekrózy nejsou snadno odstranitelné a rána není opticky čistá.

Po zlepšení stavu rány se doporučuje pokračovat v hojení přípravkem ActiMaris® Sensitiv – roztok na výplach a čištění ran.

V případě silných fibrinových, přilnavých povlaků nebo nekrotických okrajů rány se doporučuje jejich chirurgické odstranění.

4. Tkáňová tolerance a bio-kompatibilita

ActiMaris® Forte roztok je díky svému přírodnímu složení dobře tolerovaný, vhodný k dlouhodobému použití i na citlivou a podrážděnou kůži nebo sliznici. Nezpůsobuje podráždění a přecitlivělost. Podporuje tvorbu nové tkáně - granulaci a epitelizaci. Dermatologicky bezpečný.

5. Vedlejší účinky

Žádné vedlejší účinky nejsou v současnosti známy.

6. Kontraindikace:

ActiMaris® Forte roztok nepoužívejte při známé přecitlivělosti nebo podezření na alergii na kteroukoliv složku přípravku.

7. Omezení použití:

Těhotenství a laktace: Nejsou známy žádné případy mutagenních nebo embryotoxických účinků. Z důvodu nedostatku studií a dlouhodobých zkušeností s působením na těhotné a kojící ženy by se měl ActiMaris® Forte roztok použít jen po předchozím lékařském zvážení rizik a přínosů.

Kojenci a novorozenci: Před použitím přípravku ActiMaris® Forte roztok se poraďte s lékařem.

8. Interakce

ActiMaris® Forte roztok účinkuje na základě oxidace aktivních složek kyslíku.

ActiMaris® Forte roztok by neměl být míchán nebo používán v kombinaci s látkami obsahujícími stříbro, biguanid, taurolidin nebo jód. To platí rovněž u případného zvlhčování obvazů a krytí ran: zde lze použít jen sterilní, neaktivní obvazové materiály, jako jsou volné a kompresní obvazy, gázy, tampony, hydro-gely, hydro-vlákna, algináty, hydro-koloidy a podobné materiály.

Pokud se ActiMaris® Forte roztok použije v klasické mokré / suché fázi s odpovídající délkou vysoušení, pak nedochází k žádným interakcím s následně aplikovanými přípravky na hojení ran.

ActiMaris® Forte roztok lze s výhodou kombinovat s dalšími přípravky ActiMaris® (GEL na hojení ran a SENSITIV - roztok na výplach a hojení ran).

9. Obecné bezpečnostní instrukce:

ActiMaris® Forte roztok je vhodný pouze pro zevní použití na kůži a sliznice.

Nepoužívejte pro přípravu infuzního nebo injekčního roztoku!

Nepolykejte!

Udržujte mimo dosah dětí!

Používejte pouze přípravek v neotevřeném a nepoškozeném obalu.

Barevné textilie mohou vyblednout po kontaktu s přípravkem ActiMaris® Forte.

10. Složení a technické vlastnosti:

Aktivní singletový kyslík, ionizovaná přečištěná zásaditá voda, mořská sůl.

Čirý, bezbarvý, zásaditý a hypertonický roztok mořské soli s charakteristickou vůní. Obsahuje 3 % NaCl (mořská sůl) a 0,2 % NaOCl.

11. Skladování, doba trvání a datum použitelnosti:

ActiMaris® Forte roztok by měl být uchovávan při pokojové teplotě mezi +5° a +25° C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba použitelnosti 30 měsíců.

Datum použitelnosti je uvedeno na obalu.

Obsah balení lze využívat po dobu 3 měsíců po prvním otevření. Po každém použití pečlivě uzavřete.

ActiMaris AG



simple medical solutions

Výrobce:

ActiMaris AG
Technikumstrasse 14
CH-9470 Buchs SG
Švýcarsko

Distributor:

EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
Tel: +420 602 556 877
www.actimaris.cz

Datum informace: 06/2013 – V3.0

Zdravotnický prostředek: Třída II b, CE 0408

