



Obecně se předpokládá, že mikroorganismy osídlují různé typy ran. Jejich dekontaminace, důkladné vyčištění rány a ošetření životaschopné tkáně je důležité, aby se zabránilo infekci a byla zajištěna optimální podpora procesu hojení.

ActiMaris® Gel na hojení ran (20 g)

Obecné informace: ke snížení zánětu, zvlhčení a urychlení hojení akutních i chronických ran na kůži i sliznici a popálenin 1. a 2. stupně. Podporuje tvorbu nové tkáně. ActiMaris® Gel je určen i k použití na citlivou či podrážděnou kůži a sliznice dutiny ústní, nosní a genitálií.

1. Profil přípravku:

ActiMaris® Gel na hojení ran obsahuje aktivní singletový kyslík(¹O₂), mořskou sůl a ionizovanou zásaditou vodu.

Aktivní kyslík účinně a bez poškození tkáně eliminuje patogenní mikroorganismy (bakterie, viry, plísně). Oxidační efekt singletového kyslíku (¹O₂) výrazně neutralizuje zápach rány.

Alkalické pH podporuje kontrolované postupné uvolňování aktivního kyslíku pomocí hydroxylových (OH) skupin - jako součást přirozeně vyváženého oxidačně-redukčního systému.

Mořská sůl obsahuje chlorid sodný jako hlavní složku a více než 80 dalších prvků (hořčík, draslík, vápník, síru, železo a nezbytné stopové množství jódu, zinku, manganu a selenu). Stejně jako v mořské vodě, i v ActiMaris® Gelu jsou tyto prvky přítomny v přírodní komplexní sloučenině a ve fyziologicky správných koncentracích, takže příznivě ovlivňují děje na buněčné úrovni a metabolismus rány.

Zvýšená slanost ActiMaris® Gelu na hojení ran způsobuje optimální hyper-osmotický efekt, který podporuje rychlé zmenšení otoku.

2. Oblasti použití:

ActiMaris® Gel na hojení ran je vhodný:

K desinfekci, zvlhčení, snížení zánětu a urychlení hojení

- akutních mechanických ran (odřeny, řezné, tržné rány, puchýře, opruzeniny, bodnutí hmyzem)
- zánětlivých procesů na kůži a sliznici (afty, akné, opary, plísněvé infekce, záněty dutiny ústní, dásní, zvukovodu)
- čerstvých pooperačních ran a jizev
- chronických ran (běrcové a diabetické vředy, infekční rány, píštěle, dekubity)
- termických a chemických ran (popáleniny 1. a 2. stupně)
- vstupních míst katetrů, PEG trubic a drénů

ActiMaris® Gel je obzvláště vhodný na urychlení hojení závažných, špatně se hojících či infekčních ran a také jako plnivo do hlubokých ran.

ActiMaris® Gel je určen i k použití na citlivou či podrážděnou kůži i sliznici (dutina ústní, nosní, genitálie).

3. Instrukce k použití

ActiMaris® Gel na hojení ran se uchovává při pokojové teplotě. Je-li to nezbytné, lze jej před použitím zahřát na tělesnou teplotu (37° C). Před aplikací gelu se doporučuje ránu nejdříve vyčistit přípravkem ActiMaris® Sensitiv nebo Forte - roztok na výplach a čištění ran. Gel potom jemně naneste přímo na ránu ve vrstvě 1-2mm a dle potřeby zakryjte inertním obvazem, gázou, náplastí apod. Doba trvání a četnost aplikace by měly být přizpůsobeny stavu rány. V aplikaci je třeba pokračovat, dokud všechny povlaky a nekrózy nejsou snadno odstranitelné a rána není opticky čistá.

V případě obtížně odstranitelných ob vazů a krytí se doporučuje navlhčit je roztokem ActiMaris® Sensitiv na dobu alespoň 5 minut, aby se daly snadněji odstranit bez poškození nově vytvořené tkáně.

V případě silných přilnavých fibrinových povlaků nebo nekrotických částí rány se doporučuje nejprve jejich chirurgické odstranění.

4. Tkáňová tolerance a bio-kompatibilita

ActiMaris® Gel na hojení ran je díky svému přírodnímu složení dobře tolerovaný, vhodný k dlouhodobému použití i na citlivou kůži a sliznici. Nezpůsobuje podráždění a přecitlivělost. Podporuje tvorbu nové tkáně - granulací a epitelizaci. Dermatologicky bezpečný.

5. Vedlejší účinky

Žádné vedlejší účinky nejsou v současnosti známy.

6. Kontraindikace:

ActiMaris® Gel nepoužívejte při známé přecitlivělosti nebo podezření na alergii na kteroukoliv složku přípravku.

7. Omezení použití:

Těhotenství a laktace: Nejsou známy žádné případy mutagenních nebo embryotoxických účinků. Z důvodu nedostatku studií a dlouhodobých zkušeností s působením na těhotné a kojící ženy by se měl ActiMaris® Gel na hojení ran použít jen po předchozím lékařském zvážení rizik a přínosů.

Kojenci a novorozenci: Před použitím přípravku ActiMaris® Gel na hojení ran se poraďte s lékařem.

8. Interakce

ActiMaris® Gel na hojení ran účinkuje na základě oxidace aktivních složek kyslíku.

Aby se předešlo možným interakcím, gel by neměl být míchán nebo používán v kombinaci s látkami obsahujícími stříbro, biguanid, taurolidin nebo jód. To platí rovněž u případného zvlhčování obvazů a krytí ran: zde lze použít jen sterilní, neaktivní obvazové materiály, jako jsou volné a kompresní obvazy, gázy, tampony, houby, hydro-gely, hydro-vlákna, algináty, hydro-koloidy a podobné materiály.

ActiMaris® Gel na hojení ran lze s výhodou kombinovat s dalšími přípravky ActiMaris® (SENSITIV – roztok na výplach ran a FORTE - roztok na čištění a hojení ran).

9. Obecné bezpečnostní instrukce:

ActiMaris® Gel na hojení ran je vhodný pouze pro zevní použití na kůži a sliznice.

Nepoužívejte pro přípravu infuzního nebo injekčního roztoku!

Nepolykejte!

Udržujte mimo dosah dětí!

Používejte pouze přípravek v neotevřeném a nepoškozeném obalu.

Barevné textilie mohou vyblednout po kontaktu s přípravkem ActiMaris® Gel na hojení ran.

10. Složení a technické vlastnosti:

Aktivní kyslík, ionizovaná přečištěná zásaditá voda, mořská sůl.

Čirý, bezbarvý, zásaditý a hypertonický gel s charakteristickou vůní. Obsahuje 3 % NaCl (mořská sůl) a 0,2 % NaOCl.

11. Skladování, trvání a datum použitelnosti:

ActiMaris® Gel na hojení ran by měl být uchováván při pokojové teplotě mezi +5° a +25° C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba použitelnosti 30 měsíců.

Datum použitelnosti je uvedeno na obalu.

Obsah balení lze využívat po dobu 3 měsíců po prvním otevření. Po každém použití pečlivě uzavřete.

ActiMaris AG



simple medical solutions

Výrobce:

ActiMaris AG
Technikumstrasse 14
CH-9470 Buchs SG
Švýcarsko

Distributor:

EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
Tel: +420 602 556 877
www.actimaris.cz

Datum informace: 06/2013 – V3.0

Zdravotnický prostředek: Třída II b, CE 0408

