



Obecně se předpokládá, že mikroorganismy osídlují různé typy ran. Jejich dekontaminace, důkladné vyčištění rány a ošetření životaschopné tkáně je důležité, aby se zabránilo infekci a byla zajištěna optimální podpora procesu hojení.

ActiMaris® Sensitiv – roztok na výplach a hojení ran (300 ml nebo 1000 ml)

Obecné informace: k výplachu, bezbolestné desinfekci, snížení zánětu a urychlení hojení akutních a chronických ran na kůži i sliznici a popálenin 1. a 2. stupně. ActiMaris® Sensitiv roztok je vhodný k použití i na citlivou kůži a sliznice dutiny ústní, nosní a genitálií. Určen i pro děti a kojence.

1. Složení přípravku:

ActiMaris® Sensitiv roztok obsahuje aktivní singletový kyslík ($^1\text{O}_2$), mořskou sůl a ionizovanou zásaditou vodu.

Aktivní kyslík účinně a bez poškození tkáně eliminuje patogenní mikroorganismy (bakterie, viry, plísňe). Oxidační efekt singletového kyslíku ($^1\text{O}_2$) výrazně neutralizuje zápach rány.

Alkalické pH podporuje kontrolované uvolňování aktivního kyslíku pomocí hydroxylových (OH) skupin - jako součást přirozeně vyváženého oxidačně-redukčního systému.

Mořská sůl obsahuje chlorid sodný jako hlavní složku a více než 80 dalších prvků (hořčík, draslík, vápník, síru, železo a nezbytné stopové množství jódu, zinku, manganu a selenu). Stejně jako v mořské vodě, i v ActiMaris® Sensitiv roztoku jsou tyto prvky přítomny v přírodní komplexní sloučenině a ve fyziologicky správných koncentracích, takže příznivě ovlivňují děje na buněčné úrovni a metabolismus rány.

Zvýšená slanost ActiMaris® Sensitiv způsobuje optimální hyper-osmotický efekt, který podporuje rychlé zmenšení otoku.

2. Oblasti použití:

ActiMaris® Sensitiv roztok je vhodný:

K výplachu, desinfekci, snížení zánětu a urychlení hojení

- akutních mechanických ran (odřeniny, řezné, tržné rány, puchýře, opruzeniny, bodnutí hmyzem)
- zánětlivých procesů na kůži a sliznici (afty, akné, opary, plísňové infekce, záněty dutiny ústní, dásní, zvukovodu)
- čerstvých pooperačních ran a jizev
- chronických ran (běrcové a diabetické vředy, infekční rány, píštěle, dekubity)
- termických a chemických ran (popáleniny 1. a 2. stupně)
- vstupních míst katetrů, PEG trubic a drénů

K peroperačnímu čištění a oplachování ran.

Ke zvlhčení a změkčení obvazového materiálu a krytí ran při jeho výměně nebo pokud je přilepeno k ráně.

K dekontaminaci těla při pozitivním nálezu MRSA, VRE.

3. Instrukce k použití

ActiMaris® Sensitiv roztok se uchovává při pokojové teplotě. Při ošetření velmi bolestivých ran jej lze zahřát na tělesnou teplotu (37° C).

Doba trvání a četnost aplikace by měly být přizpůsobeny stavu rány. V aplikaci je třeba pokračovat, dokud všechny povlaky a nekrózy nejsou snadno odstranitelné a rána není opticky čistá.

V závislosti na stavu rány, indikaci a fázi hojení se výměna obvazů provádí minimálně 1x – 2x denně. V případě obtížně odstranitelných obvazů a krytí se doporučuje navlhčit je roztokem ActiMaris® Sensitiv na dobu alespoň 5 minut, aby se daly snadněji odstranit bez poškození nově vytvořené tkáně.

Po vyčištění a výplachu rány lze k jejímu krytí použít sterilní obvaz, tkaninu navlhčenou ActiMaris® Sensitiv roztokem.

Doba trvání aplikace by se měla přizpůsobit tloušťce a pevnosti fibrinu, mikrobiální kolonizaci, maceraci (změknutí) okrajů rány nebo podráždění okolí:

- Stabilní prostředí a okolí rány bez přítomnosti mikroorganismů -> doporučený čas aplikace **5-10 minut**.
- Fibrinový povlak, bez přítomnosti mikroorganismů, macerace a podráždění na okrajích rány -> doporučený čas aplikace **15 minut**.
- Fibrinem pokryté, páchnoucí rány, s přítomností bakterií -> doporučený čas aplikace **20 minut**.

Doporučená doba aplikace při výplachu dutiny ústní je alespoň **30 sekund**.

4. Tkáňová tolerance a bio-kompatibilita

ActiMaris® Sensitiv roztok je díky svému přírodnímu složení dobře tolerovaný, vhodný k dlouhodobému použití i na citlivou a podrážděnou kůži nebo sliznici. Nezpůsobuje podráždění a přecitlivělost. Podporuje tkáňovou granulaci a epitelizaci. Dermatologicky bezpečný.

5. Vedlejší účinky

Žádné vedlejší účinky nejsou známy a přítomny. Barevné textilie mohou změnit barvu, pokud se dostanou do kontaktu s roztokem ActiMaris® Sensitiv.

6. Kontraindikace:

ActiMaris® Sensitiv roztok nepoužívejte při známé přecitlivělosti nebo podezření na alergii na kteroukoliv složku přípravku.

7. Omezení použití:

Těhotenství a laktace: Nejsou známy žádné případy mutagenních nebo embryotoxických účinků. Z důvodu nedostatku studií a dlouhodobých zkušeností s působením na těhotné a kojící ženy by se měl ActiMaris® Sensitiv roztok použít jen po předchozím lékařském zvážení rizik a přínosů.

Kojenci a novorozenci: Před použitím přípravku ActiMaris® Sensitiv roztok se poraďte s lékařem.

8. Interakce

ActiMaris® Sensitiv roztok účinkuje na základě oxidace aktivních složek kyslíku.

ActiMaris® Sensitiv roztok by neměl být míchán nebo používán v kombinaci s látkami obsahujícími stříbro, biguanid, taurolidin nebo jód. To platí rovněž u případného zvlhčování obvazů a krytí ran: zde lze použít jen sterilní, neaktivní obvazové materiály, jako jsou volné a kompresní obvazy, gázy, tampony, hydro-gely, hydro-vlákna, algináty, hydro-koloidy a podobné materiály.

ActiMaris® Sensitiv roztok lze s výhodou kombinovat s dalšími přípravky ActiMaris® GEL na hojení ran a FORTE - roztok na čištění a hojení ran.

9. Obecné bezpečnostní instrukce:

ActiMaris® Sensitiv roztok je vhodný pouze pro zevní použití na kůži a sliznice.

Nepoužívejte pro přípravu infuzního nebo injekčního roztoku!

Nepolykejte!

Udržujte mimo dosah dětí!

Používejte pouze přípravek v nepoškozeném obalu.

10. Složení a technické vlastnosti:

Aktivní singletový kyslík, ionizovaná přečištěná zásaditá voda, mořská sůl.

Čirý, bezbarvý, zásaditý a hypertonický roztok mořské soli s charakteristickou vůní. Obsahuje 1,2 % NaCl (mořská sůl) a 0,04 % NaOCl.

11. Skladování, trvání a datum použitelnosti:

ActiMaris® Sensitiv roztok by měl být uchováván při pokojové teplotě mezi +5° a +25° C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba použitelnosti 30 měsíců.

Datum použitelnosti je uvedeno na obalu.

Obsah balení lze využívat po dobu 3 měsíců po prvním otevření. Po každém použití pečlivě uzavřete.

ActiMaris AG



simple medical solutions

Výrobce:

ActiMaris AG
Technikumstrasse 14
CH-9470 Buchs SG
Švýcarsko

Distributor:

EMPOLAS s.r.o.
Česká republika
info@empolas.com
Tel: +420 602 556 877
www.actimaris.cz

Datum informace: 06/2013 – V3.0

Zdravotnický prostředek: Třída II b, CE 0408

